

## 檢驗醫學部公告

■ 內部公告：郭檢字 1141203 號  
 □ 依據 UOF 電子公文 ID：  
 □ 依據外部公告：

□ 公告編號：郭檢字 1141203 號

□ 公告事項：

114/12/09 起，變更尿沈渣(Urine sediment)檢驗報告格式。

□ 公告日期：114.12.09

□ 公告對象：全院醫師、護理部、檢驗科

□ 內容說明：

1. 檢驗科引進 **Arkray AI-4510 尿液沉渣分析儀**，依台灣醫檢學會「**尿沈渣鏡檢指引**」，變更尿沉渣項目報告格式。

2. RBC、WBC、Cast 與 Epithelial cell 報告格式。

項目	單位	尿沉渣報告格式							
RBC	HPF	0-2	3-5	6-9	10-19	20-29	30-49	50-99	≥100
WBC	HPF	0-5		6-9	10-19	20-29	30-49	50-99	≥100
EP cell	HPF	0-5		6-9	10-19	20-29	30-49	50-99	≥100
Cast	LPF	0-2	3-5	6-9	10-19	20-29	30-49	50-99	≥100

參考值：RBC：0-5/HPF、WBC：0-5/HPF、EP cell：0-5/HPF  
 Cast 需註明種類；參考值為 Hyaline cast 0-2/LPF

3. Crystal、Bacteria 、Yeast 報告格式。

		尿沉渣報告格式			
項目	HPF	—	1+	2+	3+
Crystal	價數定義	無	少數視野有	每個視野皆有	充滿每個視野
Bacteria 、Yeast	價數定義	無或每個視野有少量	每個視野皆有少量	每個視野皆有許多	充滿每個視野

參考值：Crystal 需註明種類；參考值為(—)；  
 Bacteria 、Yeast 參考值為(—)

## 檢驗醫學部公告

內部公告：郭檢字 1141203 號  
依據 UOF 電子公文 ID：  
依據外部公告：

### 4. Dysmorphic RBC 變形紅血球報告格式。

項目	尿沉渣報告格式
Dysmorphic RBC (HPF)	(1) 計數 100 顆 RBC 得到變形紅血球所佔百分比。 (2) 當 Dysmorphic RBC 數量低於 6/HPF 時，在備註欄說明：「當變形紅血球數量低於 6/HPF 時，不判定 Dysmorphic RBC Score，結果以 NA 表示」。

參考值：Dysmorphic RBC <20 %

製訂者：郭綜合醫院 檢驗醫學部（ 2305）